

ВЕЛТОЦИД

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Протирание поверхностей (бактерии, исключая туберкулез)	0,025 % - 120 минут
	0,05 % - 60 минут
	0,1 % - 30 минут
	0,25 % - 15 минут
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	0,25 % - 60 минут
Протирание поверхностей (туберкулез)	0,5 % - 60 минут
	0,75 % - 30 минут
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	0,5 % - 60 минут
	1 % - 30 минут
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1% - 90 минут
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1 % - 60 минут
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.)	1 % - 60 минут
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	ИМН из металлов,пластмасс, стекла:
	0,25 % - 60 минут
	ИМН из резин:
	1 % - 60 минут
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	ИМН из металлов,пластмасс, стекла:
	0,25 % - 60 минут
	0,5 % - 30 минут
	ИМН из резин:
	1 % - 60 минут
ПСО	ИМН без полостей,каналов,замков:
	0,05 % - 30 минут
	ИМН прочие:
	0,2 % - 15 минут
Дезинфекция кувезов	0,025 % - 60 мин.
	1 % - 30 мин.
Дезинфекция поверхностей против плесени	0,25 % - 60 мин.
<i>Примечание:</i> раствора на однократное протирание поверхностей 100 мл/м ² ; 2 - расход раствора на однократное протирание оборудования 100 мл/м ² ; 4л/кг сухого белья; 4 - расход раствора 2л/комплект столовой посуды	
	1 - расход 3 - расход раствора