

ВЕЛТОЛЕН**ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ**

Протирание поверхностей (бактерии, исключая туберкулез)	0,125 % - 60 минут
	0,25 % - 30 минут
	0,5 % - 15 минут
	1 % - 5 минут
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1 % - 30 минут
Протирание поверхностей (туберкулез)	0,5 % - 120 минут
	1 % - 60 минут
	2 % - 30 минут
	4 % - 15 минут
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,25 % - 60 минут
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,25 % - 60 минут
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,25 % - 60 минут
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.)	1,25 % - 60 минут
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	ИМН из металлов, пластмасс, стекла:
	1 % - 60 минут
	ИМН из резин:
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	1,25 % - 30 минут
	ИМН из металлов, пластмасс, стекла:
	1 % - 60 минут
	ИМН из резин:
ПСО	1,25 % - 30 минут
	ИМН без полостей, каналов, замков:
	0,25 % - 30 минут
	0,5 % - 15 минут
ДВУ	ИМН прочие:
	0,5 % - 30 минут
	2 % - 30 минут (при 50С); 2,5 % - 15 минут (при 50С)

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Дезинфекция кузезов	1 % - 30 минут
Дезинфекция поверхностей против плесени	0,25 % - 90 минут
	0,5 % - 60 минут
	1 % - 30 минут
	2 % - 15 минут
Дезинфекция воздуха	2 % - 60 минут (Дезинфекцию воздуха проводят с помощью аэрозольного генератора. Норма расхода раствора 50мл/м3)
Дезинфекция мочи	1,25 % - 60 минут (заливание раствором в соотношении моча:раствор 1:1)
Дезинфекция крови	1,25 % - 60 минут (заливание раствором в соотношении кровь:раствор 1:1)
Дезинфекция мокроты	1,25 % - 60 минут (заливание раствором в соотношении мокрота:раствор 1:1)
Дезинфекция фекалий	1,25 % - 60 минут (заливание раствором в соотношении фекалии:раствор 1:1)